



ADN Análisis Ltda
Laboratorio de Biología Molecular

Portafolio de Servicios

ADN Análisis Limitada es un Laboratorio de Biología Molecular especializado en el diagnóstico de enfermedades infecciosas y genéticas.

Técnica Empleada: Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) que permite la identificación de los agentes infecciosos, así como de las mutaciones en el genoma humano.

2026

Decimoséptima edición

1. INTRODUCCIÓN

Para esta nueva versión, se revisaron y actualizaron los exámenes, sus respectivas muestras y se dieron algunas recomendaciones específicas. Mejoramos la información acerca de la estabilidad de las muestras, de las temperaturas y condiciones de envío. Esta acción se reflejará en la calidad de nuestros resultados y, finalmente, en la seguridad de los pacientes.

Continuamos recibiendo sus muestras de lunes a viernes, de 8 am a 5 pm, en nuestra sede única ubicada en la Carrera 16 # 82-95, consultorio 805, en las condiciones y temperaturas establecidas para cada prueba.

Para las demás ciudades, la remisión de muestras a ADN Análisis Limitada está a cargo del laboratorio remitente, quien debe contratar un transportador que garantice la integridad de la muestra durante el trayecto y que cumpla con el plazo de entrega necesario para su adecuado procesamiento.

Cada muestra debe estar acompañada de la solicitud del cliente especificando el tipo de muestra, el examen a ser realizado y los datos de identificación del paciente, tales como; el número de la cédula de ciudadanía para los mayores de edad, el número de la tarjeta de identidad para los menores de edad mayores de siete años, el número del registro civil para los menores de siete años, el número de pasaporte o cédula de extranjería para los extranjeros, en el caso en que no exista documento de identidad de los menores de edad, se utilizará el número de la cédula de ciudadanía de la madre, o el del padre en ausencia de ésta, seguido de un número consecutivo de acuerdo al número de orden del menor en el grupo familiar.

Las muestras de sangre y médula ósea deberán ser enviadas en tubos que contienen EDTA dipotásico (2K EDTA, tapa lila). Se debe evitar heparina en las muestras para PCR por su efecto inhibidor en esta reacción.

Su colaboración durante la fase preanalítica garantiza la sensibilidad y especificidad de nuestras pruebas, generando resultados fidedignos y confiables. Agradecemos su colaboración a través de estos 26 años de trabajo.

2. ESPECIFICACIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS, CONDICIONES DE ENVÍO Y ALMACENAMIENTO

2.1. Detección y/o cuantificación de Adenovirus:

Método: Detección del ácido desoxirribonucleico viral mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real con sondas FRET para el gen Hexon.

Límite inferior de detección: 10 copias del gen amplificado.

Días de procesamiento: Lunes a viernes.

Plazo máximo para entrega de resultados: 2 días hábiles para líquido cefalorraquídeo y secreción ocular, y 4 días hábiles para las demás muestras.

Valor de Referencia: No detectable.

NOTA: Para muestras de ADN previamente extraído, favor especificar el método de extracción y el tipo de muestra de origen como sangre, tejido, etc... Otros tipos de muestras deben ser aprobados por la directora o por la subdirectora.

Tipo de muestra Adenovirus	Cantidad mínima	Toma de muestra y envío	Temperatura y periodo de estabilidad
Espuito, Lavado bronquial y broncoalveolar	No aplica	Tubo estéril	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Líquido cefalorraquídeo (no se acepta sobrenadante)	0.5 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 1 día, -20°C por 30 días
Sangre periférica	1 mL	Tubo con EDTA	18 a 25°C por 1 día, 2 a 8°C por 4 días
Plasma	1 mL	Tubo con EDTA	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Secreción ocular	No aplica	Hisopo en tubo estéril	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Orina	5 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Biopsia	Fragmento en etanol al 95 - 100%		18 a 25°C por 30 días
Cortes histológicos o bloque en parafina	Tejido fijado, por menos de 48 horas, en Formalina 10% o Paraformaldehído 4%, tamponados		18 a 25°C por 1 año
ADN extraído		Tubo estéril	2 a 8°C por 7 días -15 a -25°C por 30 días

2.2. *bcr-abl* o translocación (9:22) detección y/o cuantificación: asociada al cromosoma Philadelphia

Método: Detección del ácido ribonucleico complementario mediante transcripción reversa del ARN y reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) en tiempo real con sondas FRET. Este sistema detecta los transcritos p210 (M), p190 (m) y p230 (μ), pero no los discrimina. Para discriminación de transcritos, favor contactar las directoras del laboratorio.

Días de procesamiento: Lunes a viernes.

Plazo máximo para entrega de resultados: 3 días hábiles.

Límite inferior de detección: 10 picogramos del cDNA del gen.

Valor de Referencia: Translocación no detectable en la muestra.

Tipo de muestra <i>bcr-abl</i>	Cantidad mínima	Toma de muestra y envío	Temperatura y periodo de estabilidad
Sangre periférica	2 mL	Tubo con EDTA	18 a 25°C por 12 horas
Biopsia de medula ósea	1 mL	Tubo con EDTA	18 a 25°C por 12 horas
Sangre o medula ósea en solución estabilizante para RNA*	1 mL	Tomar la muestra en tubo EDTA y mezclar posteriormente con la solución estabilizante	2 a 8°C por 24 horas -15 a -25°C por 12 meses

*A solicitud del cliente, nuestro laboratorio suministrará la solución estabilizante "RNA /DNA Shield™" con las instrucciones de uso.

2.3. Citomegalovirus (CMV): detección y/o cuantificación (carga viral)

Método: Detección del ácido desoxirribonucleico viral mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real con sondas FRET. La cuantificación se realiza con diluciones seriadas de controles con concentración conocida.

Límite inferior de detección: 100 copias por mililitro de sangre.

Días de procesamiento: Lunes a viernes.

Plazo máximo para entrega de resultados: 2 días hábiles para líquidos cefalorraquídeo, amniótico, humor acuoso y vítreo, y 4 días hábiles para las demás muestras.

Valor de Referencia: No detectable.

NOTA: Para muestras de ADN previamente extraído, favor especificar el método de extracción y el tipo de muestra de origen como sangre, tejido, etc..Para cuantificación, favor especificar los volúmenes; cantidad de muestra extraída y el de dilución del ADN. Otros tipos de muestras deben ser aprobados por la directora o por la subdirectora.

Tipo de muestra CMV	Cantidad mínima	Toma de muestra y envío	Temperatura y periodo de estabilidad
Líquido cefalorraquídeo (no se acepta sobrenadante)	0.5 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 1 día, -20°C por 30 días

Sangre periférica	1 mL	Tubo con EDTA	18 a 25°C por 1 día 2 a 8°C por 4 días
Plasma	1 mL	Tubo con EDTA	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Líquido amniótico	4 mL	Jeringa o tubo estéril	18 a 25°C por 1 día, 2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Orina	5 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Lavado bronquial o broncoalveolar	2 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Humor acuoso o vítreo	No aplica	Jeringa o tubo estéril	2 a 8°C por 1 día, -20°C por 30 días
Biopsia	Fragmento en etanol al 95 - 100%		18 a 25°C por 30 días
Cortes histológicos o bloque en parafina	Tejido fijado, por menos de 48 horas, en Formalina 10% o Paraformaldehído 4%, tamponados		18 a 25°C por 1 año
ADN extraído	Tubo estéril		2 a 8°C por 7 días -15 a -25°C por 30 días

2.4. Virus Epstein Barr (EBV): detección y/o cuantificación (carga viral)

Método: Detección del ácido desoxirribonucleico viral mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real con sondas FRET.

Límite de inferior de detección: 10 copias del ADN del virus.

Días de procesamiento: Lunes a viernes.

Plazo máximo para entrega de resultados: 2 días hábiles para líquidos cefalorraquídeo, amniótico, humor acuoso y vítreo, y 4 días hábiles para las demás muestras

Valor de Referencia: No detectable.

NOTA: Para muestras de ADN previamente extraído, favor especificar el método de extracción y el tipo de muestra de origen como sangre, tejido, etc... Para cuantificación, favor especificar los volúmenes; cantidad de muestra extraída y el de dilución del ADN. Otros tipos de muestras deben ser aprobados por la directora o por la subdirectora.

Tipo de muestra EBV	Cantidad mínima	Toma de muestra y envío	Temperatura y periodo de estabilidad
Líquido cefalorraquídeo (no se acepta sobrenadante)	0.5 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 1 día, -20°C por 30 días
Sangre periférica o médula ósea	1 mL	Tubo con EDTA	18 a 25°C por 1 día 2 a 8°C por 4 días
Plasma o suero	1 mL	Tubo con EDTA	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días

Lavado bronquial o broncoalveolar	2 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Humor acuoso o vítreo	No aplica	Jeringa o tubo estéril	2 a 8°C por 1 día, -20°C por 30 días
Biopsia	Fragmento en etanol al 95 - 100%		18 a 25°C por 30 días
Cortes histológicos o bloque en parafina	Tejido fijado, por menos de 48 horas, en Formalina 10% o Paraformaldehído 4%, tamponados		18 a 25°C por 1 año
ADN extraído	Tubo estéril		2 a 8°C por 7 días -15 a -25°C por 30 días

2.5. Factor V de Leiden: Detección de la mutación Arg⁵⁰⁶ - Gln en el gen del Factor V

Método: Detección del ácido desoxirribonucleico humano mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real con sondas FRET.

Días de procesamiento: lunes a viernes

Plazo máximo para entrega de resultados: 5 días hábiles

Valor de Referencia: Paciente no posee la mutación.

NOTA: Para muestras de ADN previamente extraído, favor especificar el método de extracción y el tipo de muestra de origen como sangre, tejido, etc... Otros tipos de muestras deben ser aprobados por la directora o por la subdirectora.

Tipo de muestra Factor V	Cantidad mínima	Toma de muestra y envío	Temperatura y periodo de estabilidad
Sangre periférica	1 mL	Tubo con EDTA	18 a 25°C por 2 días, 2 a 8°C por 4 días
ADN extraído	Tubo estéril		2 a 8°C por 7 días -15 a -25°C por 30 días

2.6. Hemocromatosis Hereditaria: mutaciones en el gen HFE (C282Y, H63D y S65C)

Método: Detección del ácido desoxirribonucleico humano mediante reacción en cadena de la polimerasa y digestión con endonucleasas (PCR-RFLP).

Días de procesamiento: Lunes a viernes.

Plazo máximo para entrega de resultados: 5 días hábiles.

Valor de Referencia: Paciente no posee las mutaciones.

NOTA: Para muestras de ADN previamente extraído, favor especificar el método de extracción y el tipo de muestra de origen como sangre, tejido, etc... Otros tipos de muestras deben ser aprobados por la directora o por la subdirectora.

Tipo de muestra HFE	Cantidad mínima	Toma de muestra y envío	Temperatura y periodo de estabilidad
Sangre periférica	1 mL	Tubo con EDTA	18 a 25°C por 2 días, 2 a 8°C por 4 días
ADN extraído	Tubo estéril		2 a 8°C por 7 días -15 a -25°C por 30 días

2.7. HLA-B27: antígeno del Complejo Mayor de Histocompatibilidad

Método: Detección del ácido desoxirribonucleico humano mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Días de procesamiento: Lunes a viernes.

Plazo máximo para entrega de resultados: 5 días hábiles.

Valor de Referencia: Muestra negativa para HLA-B27.

NOTA: Para muestras de ADN previamente extraído, favor especificar el método de extracción y el tipo de muestra de origen como sangre, tejido, etc... Otros tipos de muestras deben ser aprobados por la directora o por la subdirectora.

Tipo de muestra HLA-B27	Cantidad mínima	Toma de muestra y envío	Temperatura y periodo de estabilidad
Sangre periférica	1 mL	Tubo con EDTA	18 a 25°C por 2 días, 2 a 8°C por 4 días
ADN extraído	Tubo estéril		2 a 8°C por 7 días -15 a -25°C por 30 días

2.8. HLA-B*57:01

Método: Detección del ácido desoxirribonucleico humano mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Días de procesamiento: lunes a viernes

Plazo máximo para entrega de resultados: 5 días hábiles

Valor de Referencia: Muestra negativa para HLA-B*57:01.

NOTA: Para muestras de ADN previamente extraído, favor especificar el método de extracción y el tipo de muestra de origen como sangre, tejido, etc... Otros tipos de muestras deben ser aprobados por la directora o por la subdirectora.

Tipo de muestra HLA-B*57:01	Cantidad mínima	Toma de muestra y envío	Temperatura y periodo de estabilidad
--------------------------------	--------------------	----------------------------	---

Sangre periférica	1 mL	Tubo con EDTA	18 a 25°C por 2 días, 2 a 8°C por 4 días
ADN extraído	Tubo estéril		2 a 8°C por 7 días -15 a -25°C por 30 días

2.9. HSV – Virus del *Herpes simplex* tipos I y II: detección y/o cuantificación (carga viral)

Método: Detección del ácido desoxirribonucleico viral mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real con sondas FRET.

Límite inferior de detección: 10 copias del gen amplificado.

Días de procesamiento: Lunes a viernes.

Plazo máximo para entrega de resultados: 2 días hábiles para líquidos cefalorraquídeo, amniótico, humor acuoso y vítreo, y 4 días hábiles para las demás muestras

Valor de Referencia: No detectable.

NOTA: Para muestras de ADN previamente extraído, favor especificar el método de extracción y el tipo de muestra de origen como sangre, tejido, etc... Otros tipos de muestras deben ser aprobados por la directora o por la subdirectora.

Tipo de muestra HSV	Cantidad mínima	Toma de muestra y envío	Temperatura y periodo de estabilidad
Líquido cefalorraquídeo (no se acepta sobrenadante)	0.5 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 1 día, -20°C por 30 días
Líquido pleural o pericárdico	1 mL	Tubo con EDTA	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Líquido amniótico	4 mL	Jeringa o tubo estéril	18 a 25°C por 1 día, 2 a 8°C por 3 días, -20°C por 30 días
Sangre periférica	1 mL	Tubo con EDTA	18 a 25°C por 1 día 2 a 8°C por 4 días
Plasma o suero	1 mL	Tubo con EDTA	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Humor acuoso o vítreo	No aplica	Jeringa o tubo estéril	2 a 8°C por 1 día, -20°C por 30 días
Lesión mucosa o cutánea	Hisopo o escobillón en tubo estéril		2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Biopsia	Fragmento en etanol al 95 - 100%		18 a 25°C por 30 días

Cortes histológicos o bloque en parafina	Tejido fijado, por menos de 48 horas, en Formalina 10% o Paraformaldehído 4%, tamponados	18 a 25°C por 1 año
ADN extraído	Tubo estéril	2 a 8°C por 7 días -15 a -25°C por 30 días

2.10. Detección y genotipificación del Virus del Papiloma Humano (HPV)

Método: Detección del ácido desoxirribonucleico viral mediante reacción en cadena de la polimerasa y tipificación de la cepa mediante digestión con endonucleasas (PCR-RFLP).

Cepas identificables y respectivos riesgos de cáncer:

Alto Riesgo: 16, 62, 35, 52, 59, 73, 45, 56, 51, 18, PAP291 o MM7, w13b, IS39, 31, 58, 33, 67, 55,39

Probable alto riesgo: 26, 34, 66, 69, 53, 64

Bajo riesgo: 81, 40, 44, 72, 61, Cp143, 57, CP6108, 6b, 11, 13, CP141, 32, 42, 54, 71, 84

Límite inferior de detección: 10 copias del gen amplificado.

Días de procesamiento: Lunes a viernes.

Plazo máximo para entrega de resultados: 4 días hábiles.

Valor de Referencia: No detectable.

NOTA: Para muestras de ADN previamente extraído, favor especificar el método de extracción y el tipo de muestra de origen como sangre, tejido, etc... Otros tipos de muestras deben ser aprobados por la directora o por la subdirectora.

Tipo de muestra HPV	Toma de muestra y envío	Temperatura y periodo de estabilidad
Cepillado cervical	Escobillón en tubo estéril o en medio de transporte	18 a 25°C por 1 día, 2 a 8°C por 4 días
Frotis uretral	Escobillón en tubo estéril o en medio de transporte	18 a 25°C por 1 día, 2 a 8°C por 4 días
Frotis lesión cavidad oral u orofaríngea	Escobillón en tubo estéril o en medio de transporte	18 a 25°C por 1 día, 2 a 8°C por 4 días
Biopsia	Fragmento en etanol al 95 - 100%	18 a 25°C por 30 días
Cortes histológicos o bloque en parafina	Tejido fijado, por menos de 48 horas, en Formalina 10% o Paraformaldehído 4%, tamponados	18 a 25°C por 1 año
ADN extraído	Tubo estéril	2 a 8°C por 7 días -15 a -25°C por 30 días

2.11. MTHFR – Mutación C677T del gen Metilenotetrahidrofolato reductasa

Método: Detección de la mutación mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real con sondas FRET.

Días de procesamiento: Lunes a viernes.

Plazo máximo para entrega de resultados: 4 días hábiles.

Valor de Referencia: Paciente no posee la mutación.

NOTA: Para muestras de ADN previamente extraído, favor especificar el método de extracción y el tipo de muestra de origen como sangre, tejido, etc... Otros tipos de muestras deben ser aprobados por la directora o por la subdirectora.

Tipo de muestra MTHFR	Cantidad mínima	Toma de muestra y envío	Temperatura y periodo de estabilidad
Sangre periférica	1 mL	Tubo con EDTA	18 a 25°C por 2 días, 2 a 8°C por 4 días
ADN extraído	Tubo estéril		2 a 8°C por 7 días -15 a -25°C por 30 días

2.12. Detección de Micobacterias del Complejo Tuberculoso con prueba de sensibilidad a Rifampicina e Isoniacida:

Método: Detección del ácido desoxirribonucleico bacteriano mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real con sonda Taqman para la región IS6110. Esta región está presente en las Micobacterias del Complejo Tuberculoso (*M. tuberculosis*, *M. bovis* y las menos frecuentes; *M. africanum*, *M. microti*, *M. caprae*, *M. pinnipedii*, y *M. canneti*). Para las muestras positivas, se realiza la detección de la resistencia a fármacos antituberculosos de primera línea por secuenciación del producto amplificado. Se analizarán los sitios de mutación del gen *rpoB*, asociados a la resistencia a Rifampicina, el Promotor *inhA* y el gen *KatG*, asociados a la resistencia a Isoniacida.

Límite inferior de detección: 100 fentogramos del ADN de la micobacteria, lo que corresponde a 100 bacterias por mililitro de muestra.

Días de procesamiento: lunes a viernes

Plazo máximo para entrega de resultados: 2 días hábiles para líquido cefalorraquídeo, humor acuoso y vítreo, y 4 días hábiles para las demás muestras.

Valor de Referencia: no detectable.

NOTA 1: Para muestras de ADN previamente extraído, favor especificar el método de extracción y el tipo de muestra de origen como sangre, tejido, etc... Otros tipos de muestras **deben ser aprobados por la directora o por la subdirectora.**

NOTA 2: Considerando que la prueba de resistencia a drogas antituberculosas de primera línea por secuenciación es un poco más demorada, los resultados se reportarán en aproximadamente 15 días después del envío del resultado positivo.

Tipo de muestra Tuberculosis	Cantidad mínima	Toma de muestra y envío	Temperatura y periodo de estabilidad
Espuito (primero del día, preferencialmente en 3 días consecutivos)	No aplica	Tubo estéril	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Líquido cefalorraquídeo (no se acepta sobrenadante)	0.5 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 1 día, -20°C por 30 días
Sangre periférica	1 mL	Tubo con EDTA	18 a 25°C por 1 día, 2 a 8°C por 4 días
Humor acuoso o vítreo	No aplica	Jeringa o tubo estéril	2 a 8°C por 1 día, -20°C por 30 días
Líquido sinovial, pleural, pericárdico o ascítico	1 mL	Tubo con EDTA	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Lavado gástrico	2 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Orina	5 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Lavado bronquial o broncoalveolar	2 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Biopsia	Fragmento en etanol al 95 - 100%		18 a 25°C por 30 días
Cortes histológicos o bloque en parafina	Tejido fijado, por menos de 48 horas, en Formalina 10% o Paraformaldehído 4%, tamponados		18 a 25°C por 1 año
ADN extraído	Tubo estéril		2 a 8°C por 7 días -15 a -25°C por 30 días

2.13. Detección de Resistencia a Rifampicina e Isoniacida:

Esta prueba se realiza para las muestras positivas para Micobacterias del Complejo Tuberculoso.

Método: Detección del ácido desoxirribonucleico bacteriano mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y secuenciación del producto amplificado. Se analizarán los sitios de mutación del gen *rpoB*, asociados a la resistencia a Rifampicina, el Promotor *inhA* y el gen *KatG*, asociados a la resistencia a Isoniacida.

Límite inferior de detección: 10 copias del gen.

Días de procesamiento: Lunes a viernes.

Plazo máximo para entrega de resultados: 15 días después del resultado de la detección.

Valor de Referencia: No detectable.

NOTA: Para muestras de ADN previamente extraído, favor especificar el método de extracción y el tipo de muestra de origen como sangre, tejido, etc... Otros tipos de muestras deben ser aprobados por la directora o por la subdirectora.

Tipo de muestra Resistencia antituberculosos	Cantidad mínima	Toma de muestra y envío	Temperatura y periodo de estabilidad
Espuito (primero del día, preferencialmente en 3 días consecutivos)	No aplica	Tubo estéril	2 a 8oC por 4 días, -20oC por 30 días
Líquido cefalorraquídeo (no se acepta sobrenadante)	0.5 mL	Tubo estéril	2 a 8oC por 1 día, -20oC por 30 días
Sangre periférica	1 mL	Tubo con EDTA	18 a 25oC por 1 día, 2 a 8oC por 4 días
Humor acuoso o vítreo	No aplica	Jeringa o tubo estéril	2 a 8oC por 1 día, -20oC por 30 días
Líquido sinovial, pleural, pericárdico o ascítico	1 mL	Tubo con EDTA	2 a 8oC por 4 días, -20oC por 30 días
Lavado gástrico	2 mL	Tubo estéril	2 a 8oC por 4 días, -20oC por 30 días
Orina	5 mL	Tubo estéril	2 a 8oC por 4 días, -20oC por 30 días
Lavado bronquial o broncoalveolar	2 mL	Tubo estéril	2 a 8oC por 4 días, -20oC por 30 días
Biopsia	Fragmento en etanol al 95 - 100%		18 a 25oC por 30 días
Cortes histológicos o bloque en parafina	Tejido fijado, por menos de 48 horas, en Formalina 10% o Paraformaldehído 4%, tamponados		18 a 25oC por 1 año
ADN extraído	Tubo estéril		2 a 8oC por 7 días -15 a -25oC por 30 días

2.14 Detección de *Mycobacterium avium* y del Complejo *Mycobacterium chelonae* (Micobacterias atípicas)

Método: Detección del ácido desoxirribonucleico bacteriano mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real con sondas Taqman® para la región espaciadora 16S-23S del rRNA. Una sonda es específica para *M. avium* y otra para el Complejo *M. chelonae*, conformado por *M. chelonae*, *M. abscessus* y *M. massiliense*.

Límite inferior de detección: 1000 fentogramos del ADN de la micobacteria.

Días de procesamiento: Lunes a viernes.

Plazo máximo para entrega de resultados: 2 días hábiles para líquido cefalorraquídeo, humor acuoso y vítreo, y 4 días hábiles para las demás muestras.

Valor de Referencia: No detectable.

NOTA: Para muestras de ADN previamente extraído, favor especificar el método de extracción y el tipo de muestra de origen como sangre, tejido, etc... Otros tipos de muestras deben ser aprobados por la directora o por la subdirectora.

Tipo de muestra Micobacterias atípicas	Cantidad mínima	Toma de muestra y envío	Temperatura y periodo de estabilidad
Espuito (primero del día, preferencialmente en 3 días consecutivos)	No aplica	Tubo estéril	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Líquido cefalorraquídeo (no se acepta sobrenadante)	0.5 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 1 día, -20°C por 30 días
Sangre periférica	1 mL	Tubo con EDTA	18 a 25°C por 1 día, 2 a 8°C por 4 días
Lesión cutánea o secreción nasofaríngea	Hisopo en tubo estéril		18 a 25°C por 1 día, 2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Humor acuoso o vítreo	No aplica	Jeringa o tubo estéril	2 a 8°C por 1 día, -20°C por 30 días
Líquido sinovial, pleural, pericárdico o ascítico	1 mL	Tubo con EDTA	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Lavado gástrico	2 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Orina	5 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Lavado bronquial o broncoalveolar	2 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Biopsia	Fragmento en etanol al 95 - 100%		18 a 25°C por 30 días
Cortes histológicos o bloque en parafina	Tejido fijado, por menos de 48 horas, en Formalina 10% o Paraformaldehído 4%, tamponados		18 a 25°C por 1 año
ADN extraído	Tubo estéril		2 a 8°C por 7 días -15 a -25°C por 30 días

2.15. Detección y/o cuantificación del Parvovirus B19:

Método: Detección del ácido desoxirribonucleico viral mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real con sondas FRET para la región orf2.

Límite inferior de detección: 10 copias del ADN del virus.

Días de procesamiento: Lunes a viernes.

Plazo máximo para entrega de resultados: 2 días hábiles para líquidos cefalorraquídeo, amniótico, humor acuoso y vítreo, y 4 días hábiles para las demás muestras.

Valor de Referencia: No detectable.

NOTA: Para muestras de ADN previamente extraído, favor especificar el método de extracción y el tipo de muestra de origen y el volumen utilizado para la extracción. Otros tipos de muestras deben ser aprobados por la directora o por la subdirectora.

Tipo de muestra Parvovirus	Cantidad mínima	Toma de muestra y envío	Temperatura y periodo de estabilidad
Líquido cefalorraquídeo (no se acepta sobrenadante)	0.5 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 1 día, -20°C por 30 días
Líquido amniótico	4 mL	Jeringa o tubo estéril	18 a 25°C por 1 día, 2 a 8°C por 3 días, -20°C por 30 días
Sangre periférica o médula ósea	1 mL	Tubo con EDTA	18 a 25°C por 1 día 2 a 8°C por 4 días
Plasma o suero	1 mL	Tubo con EDTA	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Humor acuoso o vítreo	No aplica	Jeringa o tubo estéril	2 a 8°C por 1 día, -20°C por 30 días
Lesión mucosa o cutánea	Hisopo o escobillón en tubo estéril		2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Biopsia	Fragmento en etanol al 95 - 100%		18 a 25°C por 30 días
Cortes histológicos o bloque en parafina	Tejido fijado, por menos de 48 horas, en Formalina 10% o Paraformaldehído 4%, tamponados		18 a 25°C por 1 año
ADN extraído	Tubo estéril		2 a 8°C por 7 días -15 a -25°C por 30 días

2.16. Protrombina: Detección de la mutación G20210A en el gen del Factor II

Método: Detección del ácido desoxirribonucleico humano mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real con sondas FRET.

Días de procesamiento: Lunes a viernes.

Plazo máximo para entrega de resultados: 5 días hábiles.

Valor de Referencia: Paciente no posee la mutación.

NOTA: Para muestras de ADN previamente extraído, favor especificar el método de extracción y el tipo de muestra de origen como sangre, tejido, etc... Otros tipos de muestras deben ser aprobados por la directora o por la subdirectora.

Tipo de muestra Protrombina	Cantidad mínima	Toma de muestra y envío	Temperatura y periodo de estabilidad
Sangre periférica	1 mL	Tubo con EDTA	18 a 25°C por 2 días, 2 a 8°C por 4 días
ADN extraído	Tubo estéril		2 a 8°C por 7 días -15 a -25°C por 30 días

2.17. Detección del *Toxoplasma gondii*

Método: Detección del ácido desoxirribonucleico del parásito mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real con sondas FRET.

Límite de inferior de detección: 10 Toxoplasmas por reacción.

Días de procesamiento: lunes a viernes

Plazo máximo para entrega de resultados: 2 días hábiles para líquidos cefalorraquídeo, amniótico, humor acuoso y vítreo, y 4 días hábiles para las demás muestras.

Valor de Referencia: no detectable

NOTA: Para muestras de ADN previamente extraído, favor especificar el método de extracción y el tipo de muestra de origen como sangre, tejido, etc... Otros tipos de muestras deben ser aprobados por la directora o por la subdirectora.

Tipo de muestra Toxoplasma	Cantidad mínima	Toma de muestra y envío	Temperatura y periodo de estabilidad
Líquido amniótico	4 mL	Jeringa o tubo estéril	18 a 25°C por 1 día, 2 a 8°C por 3 días, -20°C por 30 días
Líquido cefalorraquídeo (no se acepta sobrenadante)	0.5 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 1 día, -20°C por 30 días
Sangre periférica o de cordón umbilical	1 mL	Tubo con EDTA	18 a 25°C por 1 día, 2 a 8°C por 4 días
Humor acuoso o vítreo	No aplica	Jeringa o tubo estéril	2 a 8°C por 1 día, -20°C por 30 días
Biopsia	Fragmento en etanol al 95 - 100%		18 a 25°C por 30 días
Cortes histológicos o bloque en parafina	Tejido fijado, por menos de 48 horas, en Formalina 10% o Paraformaldehído 4%, tamponados		18 a 25°C por 1 año
ADN extraído	Tubo estéril		2 a 8°C por 7 días -15 a -25°C por 30 días

2.18. Detección de *Toxocara canis*, *cati* y *leonina*

Método: Detección del ácido desoxirribonucleico del parásito mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR).

Límite de inferior de detección: 10 copias del gen amplificado.

Días de procesamiento: Lunes a viernes.

Plazo máximo para entrega de resultados: 2 días hábiles para humor acuoso y vítreo, y 4 días hábiles.

NOTA: Para muestras de ADN previamente extraído, favor especificar el método de extracción y el tipo de muestra de origen como sangre, tejido, etc... Otros tipos de muestras deben ser aprobados por la directora o por la subdirectora.

Tipo de muestra Toxocara	Cantidad mínima	Toma de muestra y envío	Temperatura y periodo de estabilidad
Humor vítreo o acuoso	No aplica	Jeringa o tubo estéril	18 a 25oC por 1 día, -20oC por 30 días
Sangre periférica	1 mL	Tubo con EDTA	18 a 25oC por 1 día, 2 a 8oC por 4 días
Biopsia	Fragmento en etanol al 95 - 100%		18 a 25oC por 30 días
ADN extraído	Tubo estéril		2 a 8oC por 7 días -15 a -25oC por 30 días

2.19. Detección del Virus *Varicela zoster* (VZV)

Método: Detección del ácido desoxirribonucleico viral mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real con sondas FRET.

Límite de inferior de detección: 10 copias del ADN del virus.

Días de procesamiento: Lunes a viernes.

Plazo máximo para entrega de resultados: 2 días hábiles para líquido cefalorraquídeo, humor acuoso y vítreo, y 4 días hábiles para las demás muestras.

Valor de Referencia: No detectable.

NOTA: Para muestras de ADN previamente extraído, favor especificar el método de extracción y el tipo de muestra de origen como sangre, tejido, etc... Otros tipos de muestras deben ser aprobados por la directora o por la subdirectora.

Tipo de muestra Varicela	Cantidad mínima	Toma de muestra y envío	Temperatura y periodo de estabilidad
Líquido cefalorraquídeo (no se acepta sobrenadante)	0.5 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 1 día, -20°C por 30 días
Sangre periférica	1 mL	Tubo con EDTA	18 a 25°C por 1 día 2 a 8°C por 4 días
Lavado bronquial o broncoalveolar	2 mL	Tubo estéril	2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
Humor acuoso o vítreo	No aplica	Jeringa o tubo estéril	2 a 8°C por 1 día, -20°C por 30 días
Lesión cutánea o nasofaríngea	Hisopo en tubo estéril		18 a 25°C por 1 día, 2 a 8°C por 4 días, -20°C por 30 días
ADN extraído	Tubo estéril		2 a 8°C por 7 días -15 a -25°C por 30 días



www.adnanalisislabs.com

info@adnanalisislabs.com
Cra. 16 No. 82-95
Consultorio 805
Informes: 601-236 41 02 y 601-488 49 30
Bogotá - Colombia